



LEŻACZEK KĄPIELOWY AKVOLITO™



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **REH4MAT Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

Firma **REH4MAT Sp. z o.o.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.





Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **REH4MAT Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu.

System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

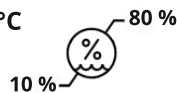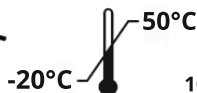



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa wyrobu.....	6
3.1. Wyposażenie standardowe.....	6
3.2. Akcesoria.....	6
4. Tabela rozmiarowa.....	7
5. Szczegółowy opis nakładania tapicerki na leżaczek.....	9
6. Opis obsługi wyrobu.....	12
6.1 Regulacje wyrobu.....	12
6.2 Tapicerka.....	14
7. Akcesoria.....	15
7.1 AKL_807 Klin międzyudowy.....	15
8. Zakładanie materaca BodyMap®.....	15
9. Użytkowanie wyrobu.....	18
10. Zasady bezpieczeństwa.....	19
11. Konserwacja i czyszczenie.....	21
12. Oznakowanie.....	23



WSTĘP

AKVOLITO™ to leżaczek kąpielowy powstały z myślą o utrzymaniu higieny.

Dzięki leżaczkowi codzienna pielęgnacja dziecka przestanie być męcząca i uciążliwa. Produkt pozwala na właściwe zabezpieczenie użytkownika znacznie ograniczając ryzyko urazów mechanicznych.

Stabilna i komfortowa pozycja w leżaczkę sprawia, że dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.

Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi.

Regulowane segmenty pozwalają na optymalne dopasowanie leżaczka do potrzeb użytkownika.

Kompaktowa budowa powoduje, że **AKVOLITO™** po złożeniu zajmuje bardzo małą przestrzeń.



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.



1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Przed przystąpieniem do użytkowania leżaczka **AKVOLITO™**, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania leżaczka kąpielowego **AKVOLITO™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Grupa docelowa:

Osoby niepełnosprawne (dzieci/młodzież) z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, rozszczepem kręgosłupa, uszkodzeniami rdzenia kręgowego oraz deficytami neurologicznymi.

Wskazania do stosowania wyrobu:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD);
- Dystrofia mięśniowa;
- Rozszczep kręgosłupa;
- Inne choroby o podłożu neurologicznym występujące z deficytami ruchowymi w postaci porażień i niedowładów kończyn i/lub tułowia.

Przeciwwskazania do stosowania wyrobu:


- Nieprawidłowe ułożenie osoby przy pomocy wyrobów kąpielowych, może prowadzić do deformacji w obrębie stawów, a długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odleżyn.
- Max. waga użytkownika: rozmiar baby - 25 kg, rozmiar 0 - 30 kg, rozmiar 1 - 50 kg, rozmiar 2 mini - 50 kg, rozmiar 2 - 60 kg, rozmiar 3 - 70 kg, rozmiar 4 - 80 kg.



3. OGÓLNA BUDOWA WYROBU

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


1. Stelaż
2. Stabilizator głowy
3. Stabilizator tułowia
4. Tapicerka nieprzemakalna
5. Stabilizator nóg

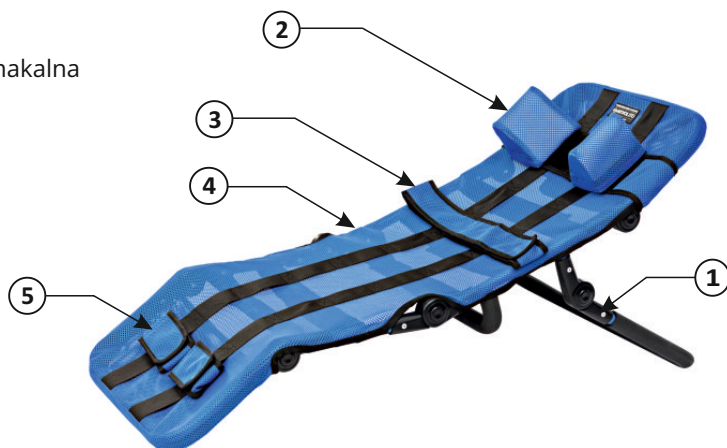

3.2 AKCESORIA



Zestaw mocujący do materaca
BodyMap® K

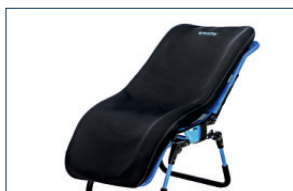

Materac stabilizujący
BodyMap® K



Mobilna wodoodporna platforma do
wyróbów kąpielowych dla dzieci
niepełnosprawnych AKVO™





Klin międzyudowy



4. TABELA ROZMIAROWA



ROZMIAR BABY

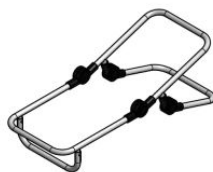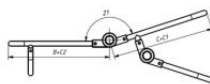

Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar Baby	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2 mini	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
A	szerokość leżaczka	[cm]	35	35	40	35	40	45	50
A ₁	szerokość użytkowa	[cm]	26	26	31	26	31	36	41
B	głębokość siedziska	[cm]	-	22	25	28	28	33	35
C	wysokość podparcia głowy	[cm]	-	19	22	26	26	30	33
C ₁	wysokość oparcia	[cm]	-	28	33	37	37	43	50
C ₂	wysokość podparcia nóg	[cm]	-	24	28	31	31	36	41
B+C ₂	głębokość siedziska z podparciem nóg	[cm]	41	46	53	59	59	69	79
C+C ₁	wysokość oparcia z podparciem głowy	[cm]	41	47	55	63	63	73	83
Z	kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska)	[°]	-	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
Z ₁	kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
Z ₂	kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia)	[°]	-	144 - 234	144 - 234	144 - 234	144 - 234	144 - 234	144 - 234
	max. waga użytkownika**	[kg]	25	30	50	50	60	70	80
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	55 - 75	< 80	< 90	< 105	< 105	< 120	< 160

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.




**UWAGA: Leżacek należy ustawiać na trzech punktach podparcia z podłożem. Jeśli leżacek ustawiony jest tylko na dwóch skrajnych punktach podparcia, dopuszczalna waga użytkownika wynosi 70% wagi maksymalnej (nie dotyczy rozmiary "Baby").

Opis	Jednostka	Rozmiar Baby	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2 mini	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
szerokość	[cm]	35	35	40	35	40	45	50
szerokość po złożeniu	[cm]	35	35	40	35	40	45	50
długość	[cm]	74 - 82	68 - 97	76 - 113	87 - 124	87 - 124	97 - 145	107 - 164
długość po złożeniu	[cm]	41	50	60	67	67	76	86
wysokość	[cm]	18 - 51	24 - 57	24 - 63	26 - 68	26 - 68	27 - 75	27 - 81
wysokość po złożeniu	[cm]	30	23	23	23	23	23	23
waga	[cm]	2,2	3	3,5	3,4	3,8	4,4	5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.

***Wymiar minimalny i maksymalny wg załączonych rysunków na stronie 8 instrukcji.

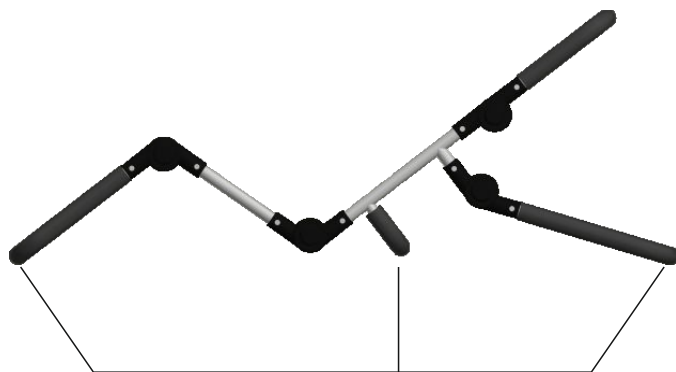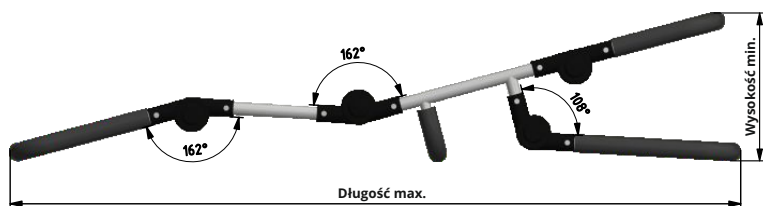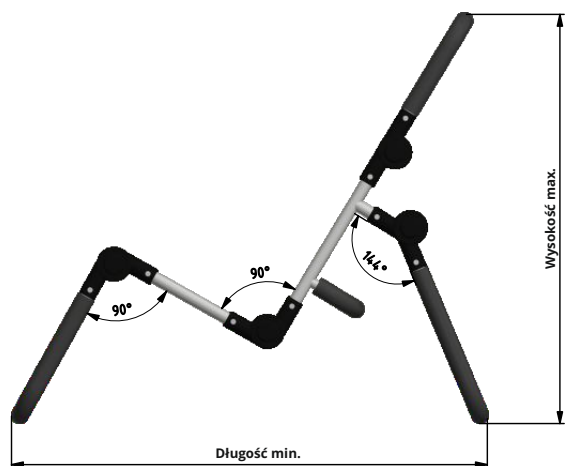

TRZY PUNKTY PODPARCIA



5. SZCZEGÓŁOWY OPIS NAKŁADANIA TAPICERKI NA LEŻACZEK

STABILIZATOR GŁOWY



STELAŻ LEŻACZKA KĄPIELOWEGO



TAPICERKA



STABILIZATOR TUŁOWIA





Aby móc założyć tapicerkę na stelaż, w pierwszej kolejności należy:

- wcisnąć przeguby (G i F) jednocześnie ustawić odpowiedni kąt między oparciem, a podnóżkiem (zgodnie z fot. 1),
- górną część tapicerki wsunąć na ramę oparcia (fot. 2, 3),
- dolną część tapicerki wsunąć na ramę podnóżka (fot. 4),

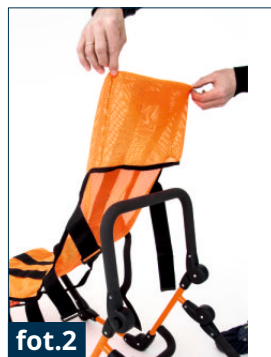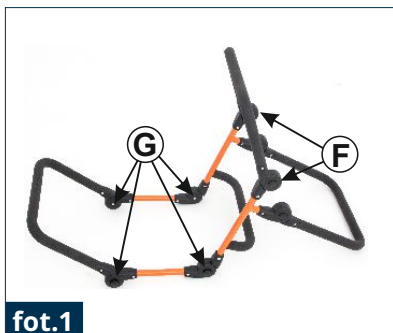

- wszystkie pasy z rzepami zapiąć od spodu leżaczka (fot. 5-7). Należy pamiętać o tym, aby pasy obejmowały ramę siedziska,





- leżaczek z nałożoną tapicerką ustawić do pozycji użytkowej (fot. 8).

Aby zamontować stabilizator głowy należy:

- dobrać odpowiednią wysokość stabilizatora na oparciu leżaczka,
- następnie za pomocą pasków z rzepami zapiąć stabilizator z tyłu leżaczka (fot. 9, 10).



fot.8



fot.9



fot.10



fot.11



6. OPIS OBSŁUGI LEŻACZKA

6.1 REGULACJE LEŻACZKA

Regulacja leżaczka **AKVOLITO™** odbywa się za pomocą przegubów. Możliwa jest regulacja następujących obszarów leżaczka:


PODPARCIE GŁOWY



SIEDZISKO I OPARCIE



PODPARCIE NÓG

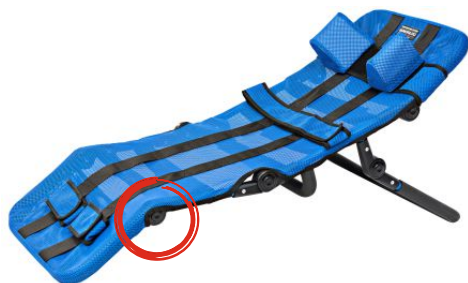



KĄT POCHYLENIA LEŻACZKA



Każdy leżaczek standardowo wyposażony jest w stabilizator głowy, pas stabilizujący tułów oraz pasy stabilizujące nogi, które zabezpieczają użytkownika w trakcie korzystania z wyrobu. Aby móc użytkować leżaczek należy:

KROK 1. Na wybranej wysokości zamontować pas z pelotami stabilizującymi głowę użytkownika. Pas zapinany jest z tyłu leżaczka na rzep. Rozstaw pelot stabilizatora można regulować.



KROK 2. Zamontować pas stabilizujący tułów użytkownika. Pas zapinany jest na rzepy i może być zamontowany na różnej wysokości. W tym celu należy przewlec pas przez przelotki znajdujące się na oparciu bądź siedzisku leżaczka i zapiąć.



KROK 3. Zamontować pasy stabilizujące nogi pacjenta. Pasy zapinane są na rzepy i mogą być zamontowane na różnej wysokości. W tym celu należy przewlec pasy przez przelotki znajdujące się na podparciu nóg leżaczka na wybranej wysokości i zapiąć.



Nie należy dokonywać regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ponieważ takie działanie może uszkodzić regulatory.

Nie należy stosować wyrobu w pełnym zanurzeniu! Podczas stosowania wyrobu w wannie, należy zachować otwarty odpływ, aby woda nie zbierała się.

Stwarza to ryzyko dla użytkownika oraz poprawności działania wyrobu.

Możliwe są niewielkie luzy wyrobu ze względu na jego konstrukcję przegubową.

6.2 TAPICERKA

Napięcie tapicerki na leżaczku można w łatwy sposób regulować za pomocą pasków z rzepami, które znajdują się pod siedziskiem.



7. AKCESORIA

7.1 AKL_807 KLIN MIĘDZYUDOWY




8. ZAKŁADANIE MATERACA BODYMAP®

W związku z tym, że wszystkie poduszki systemu podciśnieniowego **BodyMap®** są szczelne, zalecane jest stosowanie ich wraz z leżaczkiem **AKVOLITO™** w celu jeszcze lepszej stabilizacji oraz zabezpieczenia użytkownika w trakcie terapii, codziennych aktywności, a także w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Aby zamontować materac na wyrobie należy:

KROK 1. Wymontować stabilizator głowy, pas stabilizujący tułów oraz pasy stabilizujące nogi.

KROK 2. Montaż materaca odbywa się za pomocą zestawu mocującego znajdującego się w akcesoriach **AKVOLITO™**. Każdy zestaw składa się z trzech szerokich pasów stabilizujących oraz trzech rzepów pozycjonujących materac **BodyMap®** na leżaczkę.

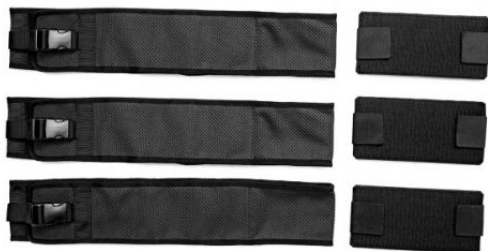



Przed nałożeniem poduszki na leżaczek należy w górnej, dolnej oraz środkowej części leżaczka zamocować rzepy. Samoszczepna powierzchnia poduszki **BodyMap®** umożliwia szybkie zamontowanie jej na leżaczku.



KROK 3. Następnie należy zamontować pasy stabilizujące. Pasy zapinane są na rzepy oraz klamrę.





KROK 4. Aby zamontować materac należy rozpiąć pasy stabilizujące, nałożyć materac na wyrób, tak aby jego samoszczepna powierzchnia stykała się z tapicerką leżaczka, ułożyć użytkownika na materacu i zapiąć pasy stabilizujące. Aby materac **BodyMap®** prawidłowo stabilizował chorego w pozycji siedzącej lub leżącej, powinien być odpowiednio wymodelowany do kształtu ciała. Wskazówki odnośnie modelowania materaca **BodyMap®** znajdują się w instrukcji użytkowania poduszek systemu **BodyMap®**.





9. UŻYTKOWANIE WYROBU



Leżaczek **AKVOLITO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej.
Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie;
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni i bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do niego;
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne;
- Dopasować leżaczek oraz stabilizator głowy do wymiarów użytkownika;
- Odpiąć pas stabilizujący tułów oraz pasy stabilizujące nogi;
- Umieścić użytkownika w leżaczku i zabezpieczyć pasami będącymi częścią wyposażenia standardowego leżaczka.

W przypadku zastosowania wraz z leżaczkiem materaca **BodyMap®** należy w pierwszej kolejności zamocować ją do leżaczka za pomocą zestawu mocującego, a następnie wymodelować do kształtu ciała.



Sprzęt jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała użytkownika, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Główną zasadą przy dopasowywaniu leżaczka jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa.

Nie należy wymuszać pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania nieprawidłowych wzorców postawy.

Przed przystąpieniem do użytkowania leżaczka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte !



10. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Leżaczek **AKVOLITO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej.
Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

Przed decyzją o zakupie leżaczka kąpielowego **AKVOLITO™**, należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze leżaczka oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania leżaczka, należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem leżaczka należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji leżaczka. Należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należyście zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
- zawsze używać pasów stabilizujących, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb użytkownika;
- zabezpieczyć użytkownika za pomocą stabilizatora głowy, pasa stabilizującego tułów oraz nogi. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m.in.. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia.

2. Zabrania się użytkowania leżaczka w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania leżaczka jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w leżaczku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać leżaczka jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Przed transportem leżaczek należy złożyć i dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.



7. Podczas użytkowania należy unikać zbliżania się do źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Leżaczek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
8. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Nie należy dokonywać regulacji w chwili, gdy wyrób jest zamoczony.

Nie należy dokonywać regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ponieważ takie działanie może uszkodzić regulatory.

Nie należy stosować wyrobu w pełnym zanurzeniu.

Podczas stosowania wyrobu w wannie, należy zachować otwarty odpływ, aby woda nie zbierała się. Stwarza to ryzyko dla użytkownika oraz poprawności działania wyrobu.

Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne dla użytkownika i powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 7 instrukcji.

Leżaczek **AKVOLITO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.



11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Leżaczek kąpielowy **AKVOLITO™** będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja leżaczka są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa leżaczek zachowywał odpowiednią estetykę, należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Tapicerka jest demontowalna i może być prana w pralkach automatycznych w temperaturze nie przekraczającej 60 stopni C;
- Nie wolno czyścić tapicerki rozpuszczalnikami i środkami żrącymi;
- Dezynfekcji tapicerki można dokonywać ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu;
- Nie chlorować;
- Nie prasować;
- Suszyć z daleka od źródeł ciepła.



Za szkody powstałe w wyniku zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących producent nie ponosi odpowiedzialności.

Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie leżaczka spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.





PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególności sprawdzić: • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skrócone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.
Raz w miesiącu.	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: • stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.



Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: • ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: • oznaczenia i etykiety wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie
www.reh4mat.com, przy wybranym produkcie.

12. OZNAKOWANIE



Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE



Numer katalogowy



Numer seryjny



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi



Uwaga!



Wytwórca



Data produkcji



Wyrób nie zawiera lateksu



Przechowywać w suchym miejscu



Wyrób medyczny



Suszyć pionowo



Nie chlorować



Nie prasować



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie wybielać



Ostrożnie, delikatna zawartość



Chronić przed promieniami słonecznymi



Ograniczenie temperatury przechowywania



Wilgotność względna





WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



35-301 Rzeszów, ul. Zenitowa 5A, POLAND

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 (016) 621 42 20
tel. +48 (016) 621 41 35, fax.: +48 (016) 621 42 13
E-mail address / Adres mailowy:
biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

Data wydania: 13.04.2015
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2024



REH4MAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.