



SIEDZISKO KĄPIELOWE
NONO MINI™
NONO MAXI™



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **REH4MAT Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

Firma **REH4MAT Sp. z o.o.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.





Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **REH4MAT Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu.

System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

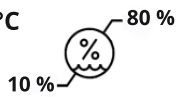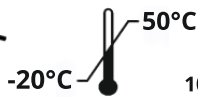

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa siedziska kąpielowego.....	6
3.1. Wyposażenie standardowe.....	6
4. Tabela rozmiarowa.....	7
5. Szczegółowy opis nakładania tapicerki.....	8
6. Opis obsługi siedziska kąpielowego.....	11
7. Użytkowanie wyrobu.....	12
8. Zasady bezpieczeństwa.....	13
9. Konserwacja i czyszczenie.....	15
10. Oznakowanie.....	17

WSTĘP

Dziecięce siedzisko kąpielowe NONO™ umożliwia pielęgnację dziecka, zapewniając jednocześnie właściwy poziom stabilizacji.

Dzięki swojej prostej konstrukcji, wyrób jest bardzo pomocny podczas kąpieli, z łatwością zmieści się do standardowej wanny, a także pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb każdego dziecka.

Dzięki bezpiecznej i komfortowej pozycji podczas zabiegów higienicznych, dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.

Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową, co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi.

Siedzisko pozwala na optymalne dopasowanie go do potrzeb chorego dziecka w pozycji (siedzącej lub leżącej), dzięki regulacji kąta nachylenia oparcia.

Oferowany w rozmiarze MINI i MAXI.



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Przed przystąpieniem do użytkowania siedziska kąpielowego **NONO™**, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania siedziska kąpielowego **NONO™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2. WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Grupa docelowa:

Osoby niepełnosprawne (dzieci/młodzież) z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, rozszczepem kręgosłupa, uszkodzeniami rdzenia kręgowego oraz deficytami neurologicznymi.

Wskazania do stosowania wyrobu:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD);
- Dystrofia mięśniowa;
- Rozszczep kręgosłupa;
- Inne choroby o podłożu neurologicznym występujące z deficytami ruchowymi w postaci porażeń i niedowładów kończyn i/lub tułowia.

Przeciwwskazania do stosowania wyrobu:

- Nieprawidłowe ułożenie osoby przy pomocy wyrobów kąpielowych, może prowadzić do deformacji w obrębie stawów, a długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odleżyn.
- Max. waga użytkownika: rozmiar mini do 60 kg, rozmiar maxi do 75 kg.


3. OGÓLNA BUDOWA SIEDZISKA KĄPIELOWEGO

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

NIEZAMAKAJĄCA TAPICERKA

PAS STABILIZUJĄCY TUŁÓW

STELAŻ

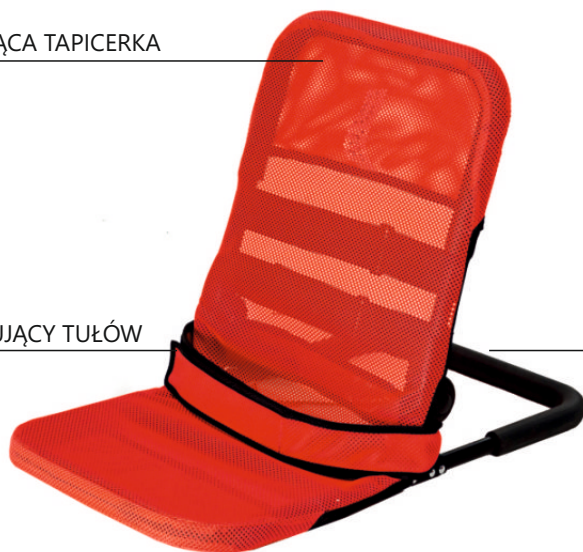

4. TABELA ROZMIAROWA




Symbol	Pomiar	Jednostka	MINI	MAXI
A	szerokość	[cm]	37,5	37,5
B	głębokość siedziska	[cm]	30	30
C1	wysokość oparcia	[cm]	45	58
	max. waga użytkownika	[kg]	60	75

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	MINI	MAXI
szerokość	[cm]	40	40
szerokość po złożeniu	[cm]	40	40
długość	[cm]	65	65
długość po złożeniu	[cm]	73	84
wysokość	[cm]	49	59
wysokość po złożeniu	[cm]	14	14
waga	[kg]	2	2,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS NAKŁADANIA TAPICERKI

STELAŻ SIEDZISKA
KĄPIELOWEGO

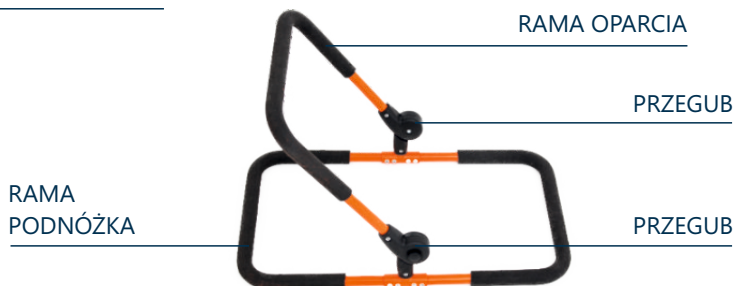

STABILIZATOR
TUŁOWIA





Zakładanie tapicerki na stelaż:

1. Naciskając równocześnie przeguby, ustawić ramę oparcia i siedziska wg fot. 1.
2. Górną część tapicerki nasunąć na ramę oparcia (fot. 2).
3. Dolną część tapicerki nasunąć na ramę siedziska (fot. 3).



4. Wszystkie pasy z rzepami należy zapiąć od spodu siedziska oraz za oparciem pamiętając, aby obejmowały one ramę (fot. 4, 5).



5. Siedzisko ustawić do pozycji użytkowej.
6. Zamontować stabilizator tułowia na wybranej wysokości oparcia siedziska. Sczepić paski od przodu siedziska (fot. 6, 7).




6. OPIS OBSŁUGI SIEDZISKA KĄPIELOWEGO


REGULACJA KĄTA POCHYLENIA OPARCIA

Aby zmienić kąt pochylenia oparcia należy jednocześnie przycisnąć regulatory po obu stronach siedziska oraz ustawić oparcie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że oparcie jest zablokowane!

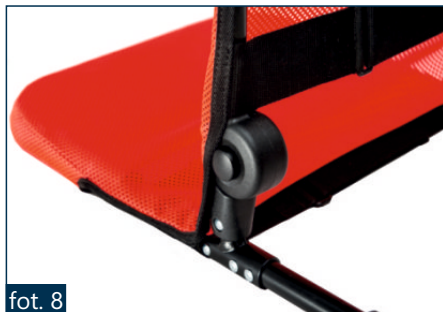

fot. 8

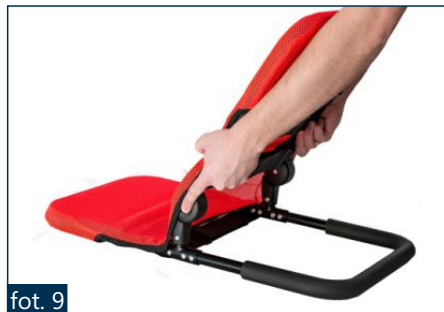

fot. 9




Nie należy dokonywać regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ponieważ takie działanie może uszkodzić regulatory.

Nie należy stosować wyrobu w pełnym zanurzeniu! Podczas stosowania wyrobu w wannie, należy zachować otwarty odpływ, aby woda nie zbierała się. Stwarza to ryzyko dla użytkownika oraz poprawności działania wyrobu.


Możliwe są luzy wyrobu ze względu na konstrukcję przegubową.

SKŁADANIE DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Dla ułatwienia przechowywania lub transportu siedziska, należy złożyć oparcie poprzez naciśnięcie regulatorów po obu stronach i jego złożenie.

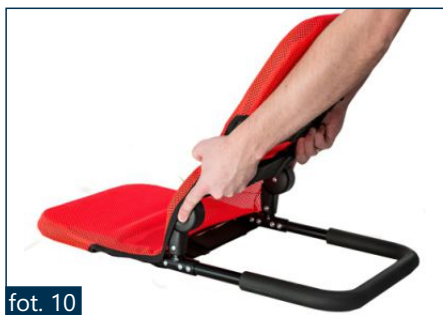

fot. 10

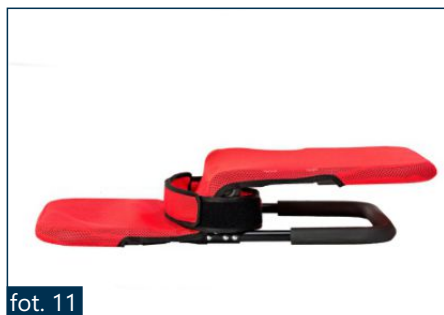

fot. 11

REGULACJA TAPICERKI

Stopień napięcia tapicerki można regulować przy pomocy pasów zapinanych za oparciem oraz pod siedziskiem wyrobu.

7. UŻYTKOWANIE WYROBU



Siedzisko **NONO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej.
Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie;
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni i bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do niego;
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należyście zamocowane i stabilne;
- Dopasować siedzisko do wymiarów użytkownika;
- Odpiąć pas stabilizujący tułów;
- Umieścić użytkownika w siedzisku i zabezpieczyć pasem będącym częścią wyposażenia standardowego siedziska.



Sprzęt jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała użytkownika, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Główną zasadą przy dopasowywaniu leżaczka jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa.

Nie należy wymuszać pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania nieprawidłowych wzorców postawy.

Przed przystąpieniem do użytkowania siedziska należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte!

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Siedzisko **NONO**TM należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

Przed decyzją o zakupie siedziska kąpielowego **NONO**TM, należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze siedziska oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania siedziska, należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem leżaczka należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji siedziska. Należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należyście zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
 - sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
 - sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
 - zawsze używać pasów stabilizujących, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
 - dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb użytkownika;
 - zabezpieczyć użytkownika za pomocą pasa stabilizującego tułów oraz nogi. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m.in.. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia.
2. Zabrania się użytkowania siedziska w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
 3. Zabrania się użytkowania siedziska jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
 4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w siedzisku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
 5. Nie należy używać siedziska jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
 6. Przed transportem siedzisko należy złożyć i dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.

7. Podczas użytkowania należy unikać zbliżania się do źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Siedzisko nie powinno być również przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
8. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Nie należy dokonywać regulacji w chwili, gdy siedzisko jest zamoczone.

Nie należy dokonywać regulacji w trakcie, gdy na wyrobie znajduje się użytkownik, ponieważ takie działanie może uszkodzić regulatory.

Nie należy stosować wyrobu w pełnym zanurzeniu.

Podczas stosowania wyrobu w wannie, należy zachować otwarty odpływ, aby woda nie zbierała się. Stwarza to ryzyko dla użytkownika oraz poprawności działania wyrobu.

Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne dla użytkownika i powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 7 instrukcji.

Siedzisko **NONO**TM należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Siedzisko kąpielowe **NONO™** będące urządzeniem medycznym, powinno być utrzymane w należytej czystości i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja siedziska są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa wyrób zachowywał odpowiednią estetykę, należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Tapicerka jest demontowalna i może być prana w pralkach automatycznych w temperaturze nie przekraczającej 60 stopni C;
- Nie wolno czyścić tapicerki rozpuszczalnikami i środkami żrącymi;
- Dezynfekcji tapicerki można dokonywać ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu;
- Nie chlorować;
- Nie prasować;
- Suszyć z daleka od źródeł ciepła.



Za szkody powstałe w wyniku zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących producent nie ponosi odpowiedzialności.

Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie fotelika spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



PRZEGLĄD TECHNICZNY
















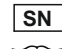



Przeeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, czy wyrób jest kompletny, czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone. 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, wszczęgólności sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.
Raz w miesiącu.	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania). 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie www.reh4mat.com, przy wybranym produkcie.

10. OZNAKOWANIE

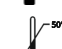	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE		Suszyć pionowo
	Numer katalogowy		Nie chlorować
	Numer seryjny		Nie prasować
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Uwaga!		Nie wybielać
	Wytwórca		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Data produkcji		Chronić przed promieniami słonecznymi
	Wyrób nie zawiera lateksu		Ograniczenie temperatury przechowywania
	Przechowywać w suchym miejscu		Wilgotność względna
	Wyrób medyczny		



WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH

REH4MAT Sp. z o.o.

35-301 Rzeszów, ul. Zenitowa 5A, POLAND

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 (016) 621 42 20
tel. +48 (016) 621 41 35, fax.: +48 (016) 621 42 13
E-mail address / Adres mailowy:
biuro@reh4mat.com
www.reh4mat.com

Data wydania: 24.04.2015
Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2024



REH4MAT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.