

KOD KATALOGOWY	AM-WSP-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-06
CODE	AM-WSP-06
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-06



(A)




(B)

(A) Prostotrzymacz / Straight holder.  
 (B) Pas lędźwiowo-krzyżowy / Lumbar-sacral belt



(1)

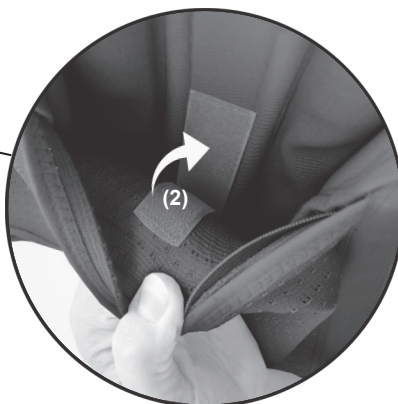

(2)

**1. PL:** Załóż ortezę na ramiona i przyłóż do sylwetki w celu dopasowania.

**EN:** Put the brace on your shoulders and adjust it to your figure for a snug fit.


**2. PL:** Dopasuj odpowiedni wysokość ortozy (1) za pomocą rzepa (2).

**EN:** Adjust the appropriate height of the brace (1) using Velcro (2).



**3. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skorygowania kształtu stelaża wyjmij go z tunelu (3).

**EN:** If there is a need to correct the shape of the frame, remove it from the tunnel (3).

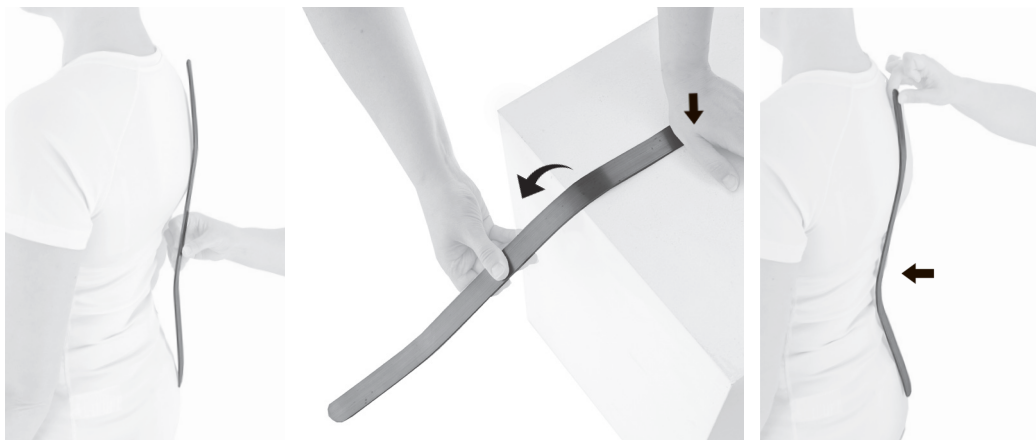


**4. PL:** Dopasuj pożądany kształt usztywnienia według wskazań terapeutycznych i ponownie umieść je w prostotrzymaczu (A).

**EN:** Adjust the desired shape of the stiffener according to therapeutic indications and place it again in the straightener (A).



**5. PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep (4) ustawiając odpowiednią kompresję.

**EN:** Fasten the front part of the brace with Velcro (4) setting the appropriate compression.

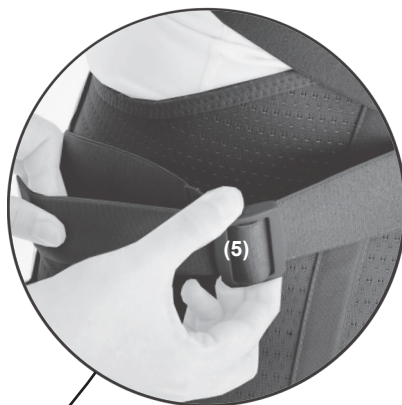

**6. PL:** Ustaw odpowiednią długość szelek przy pomocy regulatorów (5). Ustaw odpowiednią kompresję szelek i zapnij rzepy (6) z przodu.

**EN:** Set the appropriate length of the harness using the adjusters (5). Set the appropriate harness compression and fasten the Velcro straps (6) at the front.

**PL: UWAGA! Ortezy można używać w formie samej sznurówki (LSO), jako niski poziom stabilizacji.**  
**EN: WARNING! The brace can be used as a laces (LSO) as a light stabilization level.**

#### **WYSOKI POZIOM STABILIZACJI TLSO / HIGH TLSO STABILIZATION**



#### **NISKI POZIOM STABILIZACJI LSO / LOW LSO STABILIZATION**



**7. PL: Gotowy wyrób.**  
**EN: Product is ready to use.**