


KOD KATALOGOWY	AM-D-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-01
CODE	AM-D-01
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-01



- (A) Orteza / Brace
 (B) Taśma nadgarstka / Wrist Tape
 (C) Taśma przedramienia / Forearm Tape



- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i wyjmij usztywnienie kciuka (1). Uformuj usztywnienie według wskazań terapeutycznych i umieść ponownie w ortezie.
- EN:** Unfasten the brace (A) and remove the thumb splint (1). Adjust the shape of the splint as per therapeutic recommendations and place it back into the brace.

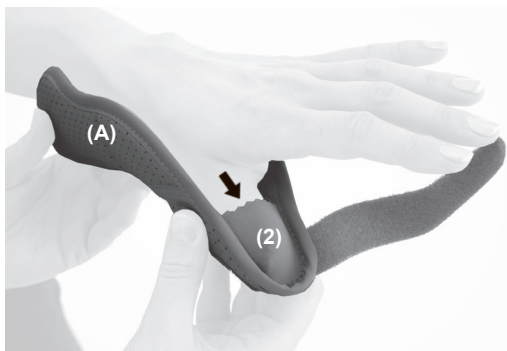

2. PL: Załóż ortezę (A) na rękę umieszczając kciuk w osłonie (2).



EN: Put the brace (A) on your hand, ensuring your thumb is placed in the designated cover (2).



**UWAGA!
ATTENTION!**


PL: Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Before applying the brace to the patient, ensure that all components are precisely adjusted to achieve the desired positioning of the secured joint or body part.

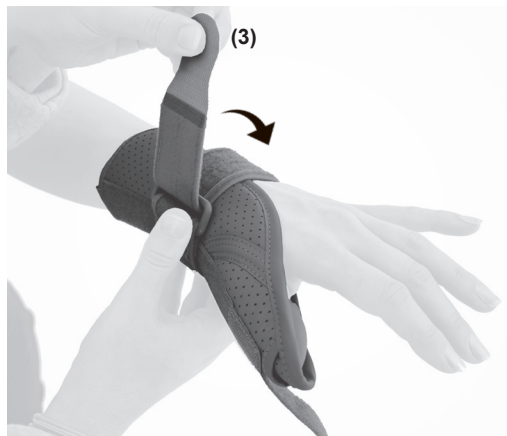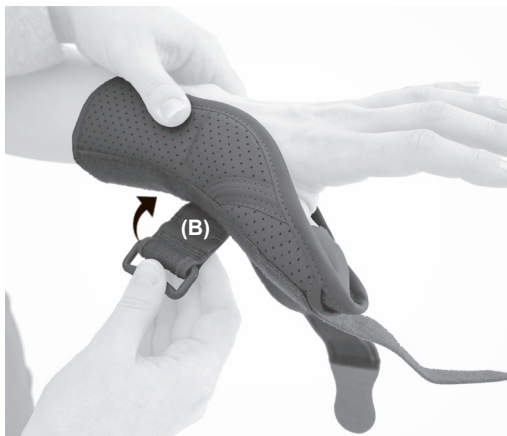


3. PL: Przypnij taśmę (B) na rzep do tunelu usztywnienia. Opleć ją wokół nadgarstka we wskazanym kierunku, przepleć przez klamerkę, ustaw odpowiednie napięcie i zapnij rzep (3).

EN: Attach the Velcro strap (B) to the stiffening tunnel. Wrap it around your wrist following the indicated direction, thread it through the buckle, adjust the tension, and secure it with Velcro (3).

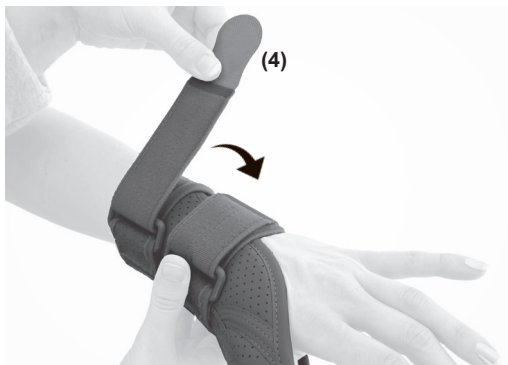

4. PL: Przypnij taśmę (C) na rzep. Opleć ją wokół przedramienia we wskazanym kierunku, przepleć przez klamerkę, ustaw odpowiednie napięcie i zapnij rzep (4).

EN: Secure strap (C) with Velcro. Wrap it around the forearm in the indicated direction, thread it through the clip, adjust the tension, and fasten it with Velcro (4).

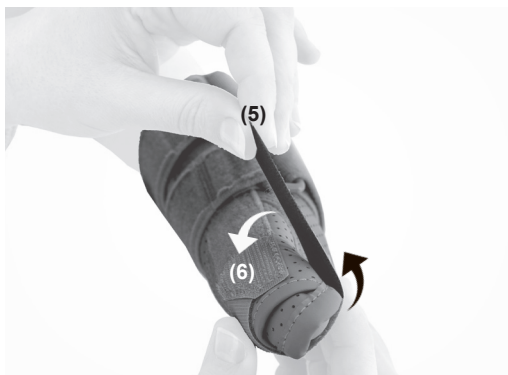

5. PL: Zapnij taśmę stabilizującą (5) oplatając ją wokół kciuka. Zapnij na rzep (6).

EN: Wrap the stabilizing strap (5) around the thumb and secure it with Velcro (6).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.