


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/1R-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSK-O/1R-01
CODE	AM-OSK-O/1R-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSK-O/1R-01



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne zapięcia (1).
EN: Unfasten the brace and loosen the rear fasteners (1).

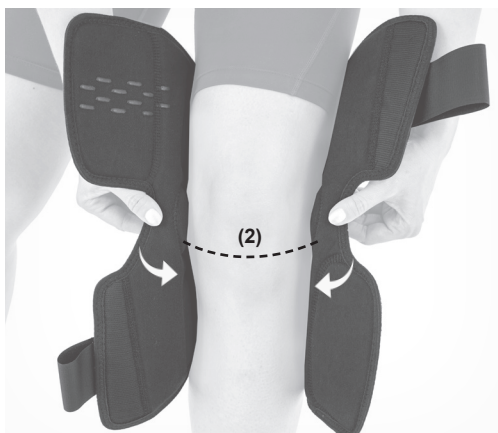

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (2) w taki sposób, aby zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego, w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: Apply the brace to the leg (2) in such a way that the drop locks of the splints are in the axis of the knee joint, within the range of joint mobility specified by the attending physician. Only a properly worn orthosis remains in the axis of the knee joint and adheres evenly to the entire limb.



- 3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (3,4).
EN: Fasten the Velcro in the given order (3,4).



4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (5,6,7,8).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (5,6,7,8).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.