


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	AM-OSS-05/CCA
CODE	AM-OSS-05/CCA
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	AM-OSS-05/CCA

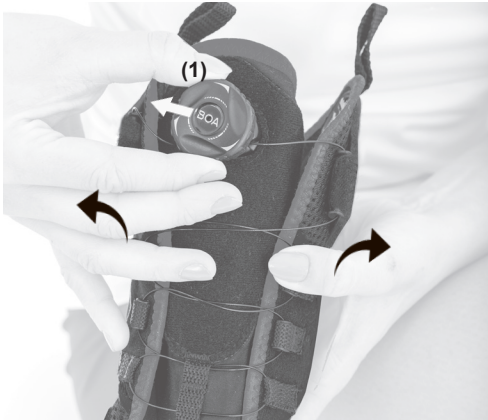

1. PL: Przed założeniem rozepnij ortezę i poluzuj BOA® Fit System (1).

EN: Before putting on unfasten the brace and loosen the BOA® Fit System (1).



2. PL: Załóż ortezę na nogę.


EN: Place the brace on the ankle.



3. PL: Za pomocą BOA® Fit System ustaw odpowiednią siłę naprężenia.

EN: Adjust the desired tension using the BOA® Fit System.



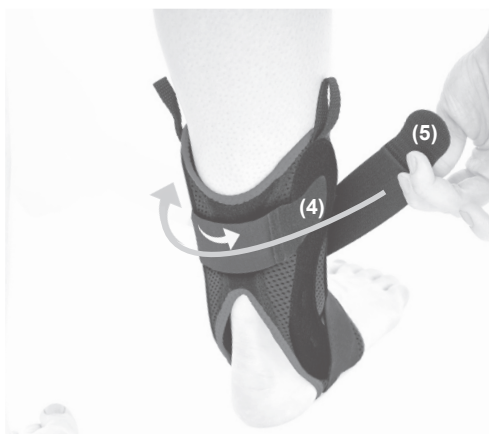

4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy ósemkowe (2,3) na rzepy (4,5) według wskazanego kierunku.

EN: Adjust the proper compression and fasten the Figure 8 straps (2,3) to the Velcro (4,5) following to the indicated direction.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.