


KOD KATALOGOWY	AM-SB-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	ORTEZA BIODRA AM-SB-01
CODE	AM-SB-01
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	HIP ORTHOSIS AM-SB-01



1. PL: Przed założeniem ortezy na kończynę, zegar powinien być ustawiony w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu biodrowego.

EN: Before you put the brace on, the range of motion in the drop lock should be adjusted according to doctor's recommendations.

2. PL: Przyłóż ortezę do nogi.
EN: Place the brace on your leg.

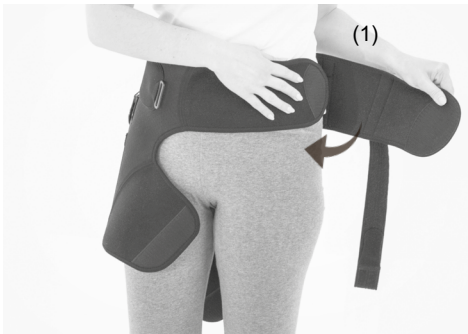

3. PL: Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro closure (1).



- 4. PL:** Zapnij rzep (2).
EN: Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Przepleć pasek przez klamkę i zapnij na rzep (3) i (4).
EN: Interlace the strap through the buckle and fasten with Velcro (3) and (4).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.