


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-21 / CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-21
CODE	AM-OSS-21 / CCA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-21

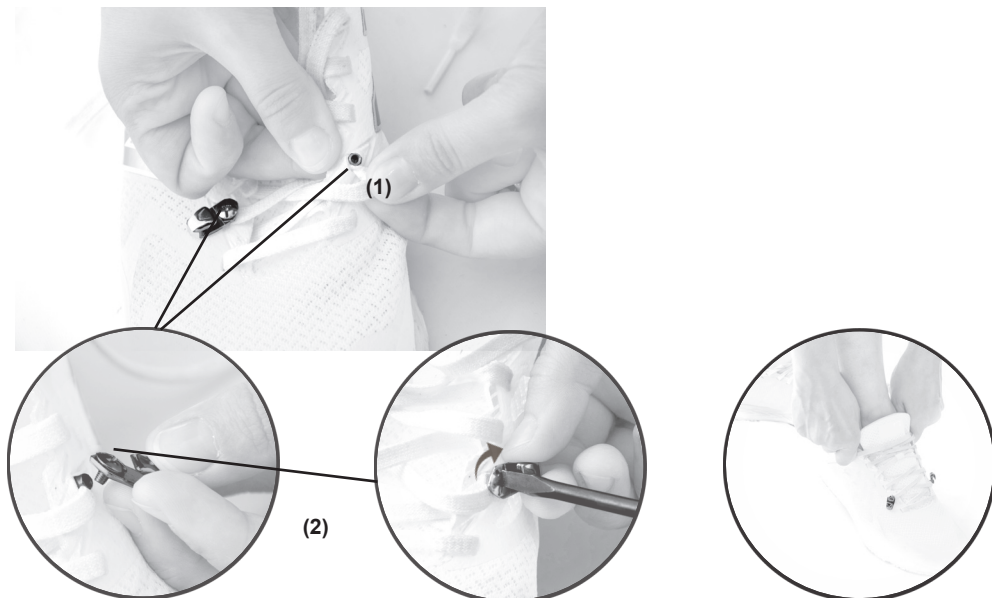


1. **PL:** Przed założeniem buta umieść nakrętki mocujące w otworach na sznurówki (1) i przykręć haczyk ze śrubą do nakrętki (2).

**UWAGA!** Im bliżej śródstopia przymocujesz nakrętki, tym mocniejszą elewację stopy uzyskasz.

**EN:** Assemble the hooks in the shoelace's holes before inserting the shoe (1) and screw the hook with screwdriver to the nut (2).

**ATTENTION!** The more you tight the dial, the more your foot will be raised.

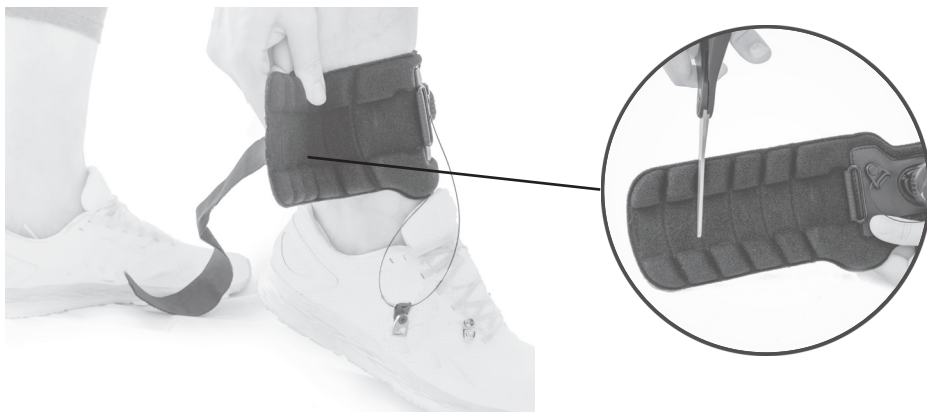

2. **PL:** Załóż ortezę na nogę i w razie potrzeby odetnij jej zbędną długość.

**EN:** Place the brace on the ankle and cut the excessive material off.



- 3. PL:** Przepleć taśmę we wskazanym kierunku (1), przełoż ją przez klamerkę (2) i zapnij na rzep (3).  
**EN:** Interlace the tape through the buckles in the specific way. (1) put the tape through the buckle (2) and fasten the Velcro (3).



- 4. PL:** Odetnij zbędną długość paska.  
**EN:** Cut the needless part of strap off.



5. **PL:** Zaczep oczka ortezy o haczyki zamontowane w obuwiu.  
**EN:** Hook the lines on the shoe.



6. **PL:** Za pomocą systemu BOA ustaw odpowiednią siłę naprężenia.  
**EN:** Adjust the required compression with the BOA Fit System.

7. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

