


|                |                |
|----------------|----------------|
| KOD KATALOGOWY | CASTUS         |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA |
| MODEL          | CASTUS         |
|                |                |
| CODE           | CASTUS         |
| TRADE NAME     | TORSO SUPPORT  |
| MODEL          | CASTUS         |




**1. PL:** Przed założeniem ortozy dopasuj usztywnienie według wskazań terapeutycznych.


**EN:** Before putting on the brace, adjust the stiffening according to therapeutic indications.

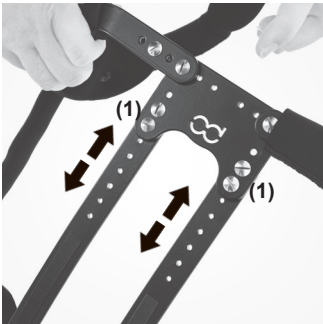

**2. PL:** Dokonaj regulacji wysokości stelaża (1).  
**EN:** Adjust the height of the frame (1).


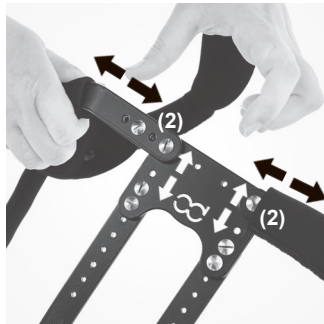


**3. PL:** Dokonaj regulacji szerokości i wysokości podparsek (2).  
**EN:** Adjust the width and height of the pads (2).

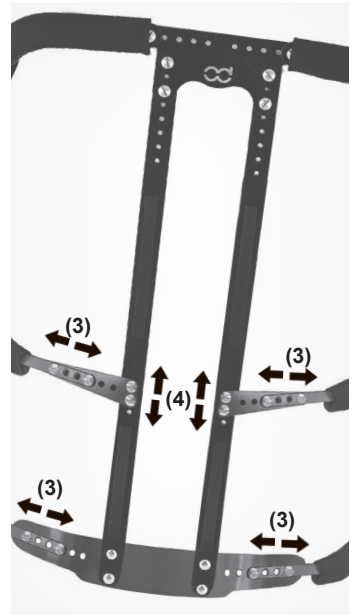

**4. PL:** Dokonaj regulacji szerokości (3) i wysokości (4) kosza biodrowego.  
**EN:** Adjust the width (3) and height (4) of the hip basket.

**PL: UWAGA!** Pamiętaj, że kształtowanie stelaża dokonujemy na wyrobie, który nie jest założony na pacjenta.  
**EN: ATTENTION!** Remember that the shaping of the frame is made on a product that is not put on a patient.

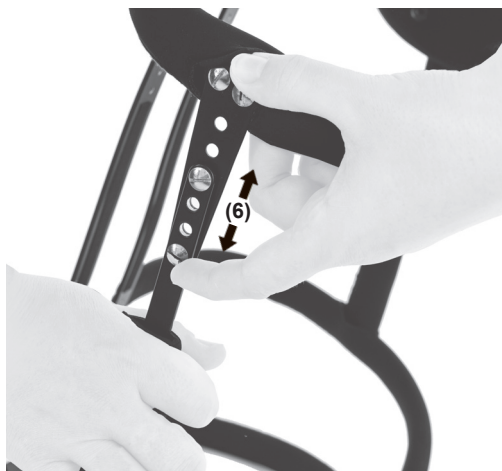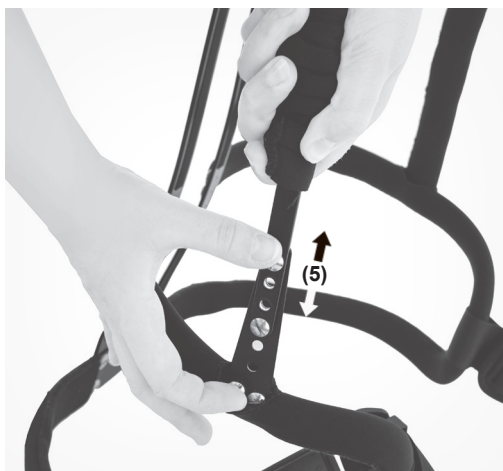

- 5. PL:** Dokonaj regulacji bocznego stabilizatora w dolnej (5) i górnej (6) jego części.  
**EN:** Adjust the side stabilizer in its lower (5) and upper (6) parts.

**PL: UWAGA!** Pamiętaj, że kształtowanie stelaża dokonujemy na wyrobie, który nie jest założony na pacjenta.  
**EN: ATTENTION!** Remember that the shaping of the frame is made on a product that is not put on a patient.



- 6. PL:** Załóż ortezę i sprawdź poprawność dokonanych regulacji.  
**EN:** Put on the brace and check whether the adjustments are correct.



- 7. PL:** Dopasuj obwód kosza biodrowego za pomocą regulatora (7) i zapnij klamrę (8).  
**EN:** Adjust the circumference of the hip basket using the adjuster (7) and fasten the buckle (8).



**8. PL:** Zapnij suwak.  
**EN:** Zip up.



**9. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.