


KOD KATALOGOWY	OSS-OS-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	ORTEZA STOPY OSS-OS-01
CODE	OSS-OS-01
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	FOOT ORTHOSIS OSS-OS-01




1. **PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

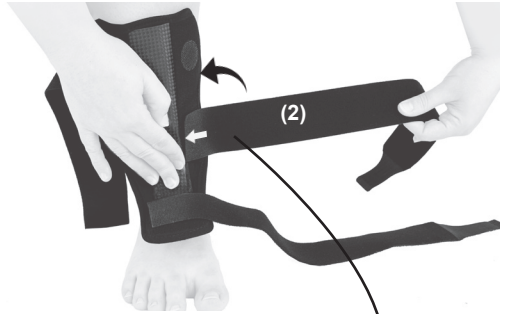

2. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi w miejscu zgięcia stopy (1). Owiń taśmę (2) nad kostką, ustaw odpowiednie napięcie, przypnij do rzepa (3) i zapnij na rzep (4). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij zbędną długość taśmy. W tym celu należy odpiąć pasek od głównego elementu ortozy, odciąć nadmiar i ponownie przypiąć do rzepa.

- EN:** Place the brace on the leg at the bend of the foot (1). Wrap the tape (2) over the ankle, set the appropriate tension, attach it to the Velcro (3) and fasten with the Velcro (4). If necessary, cut off any excess length of tape. To do this, unfasten the strap from the main element of the brace, cut off the excess and attach it to the Velcro again.

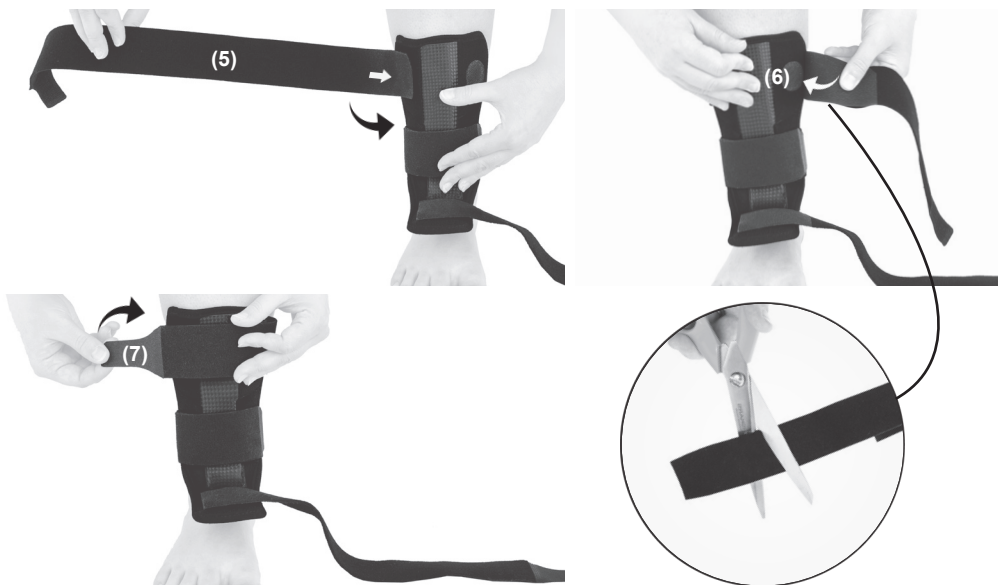

3. PL: Owiń taśmę górną (5) według wskazanego kierunku, ustaw odpowiednie nienapężenie, przypnij do rzepa (6) i zapnij na rzep (7). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij zbędną długość taśmy. W tym celu należy odpiąć pasek od głównego elementu ortozy, odciąć nadmiar i ponownie przypiąć do rzepa.

EN: Wrap the upper strap (5) in the indicated direction, set the appropriate tension, attach it to the Velcro (6) and fasten with the Velcro (7). If necessary, cut off any excess length of tape. To do this, unfasten the strap from the main element of the orthosis, cut off the excess and attach it to the Velcro again.



4. PL: Owiń stopę taśmą (8) ustawiając odpowiednie jej napężenie i zapnij na rzep (9). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij zbędną długość taśmy. W tym celu należy odpiąć pasek od głównego elementu ortozy, odciąć nadmiar i ponownie przypiąć do rzepa.

EN: Wrap the foot with the tape (8), setting the appropriate tension, and fasten it with Velcro (9). If necessary, cut off any excess length of tape. To do this, unfasten the strap from the main element of the brace, cut off the excess and attach it to the Velcro again.



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.