


KOD KATALOGOWY	AM-SX-02/CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY I STAWU SKOKOWEGO
MODEL	AM-SX-02/CCA
CODE	AM-SX-02/CCA
TRADE NAME	FOOT AND ANKLE ORTHOSIS
MODEL	AM-SX-02/CCA

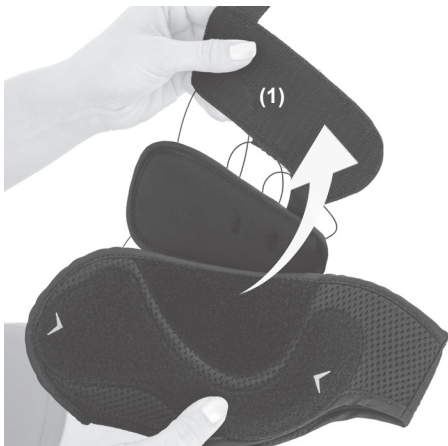

**1. PL:** Przygotuj ortezę do założenia. Odepnij rzep (1) i poluzuj BOA® Fit System (2).

**EN:** Prepare the brace for installation. Undo the Velcro (1) and loosen the BOA® Fit System (2).



**2. PL:** Upewnij się, że rzep (3) po przeciwnej stronie jest prawidłowo przypięty. Strzałki powinny znajdować się w jednej linii.

**EN:** Make sure that the Velcro (3) on the opposite side is attached correctly. The arrows should be in one line.



- 3. PL:** Załóż ortezę na nogę w taki sposób aby pięta (4) znajdowała się w otworze ortozy.  
**EN:** Put the brace on your leg so that the heel (4) is in the opening of the brace.



- 4. PL:** Przypnij rzep (5) w odpowiednim miejscu, zwróć uwagę na strzałki.  
**EN:** Attach the Velcro (5) in the appropriate place, pay attention to the arrows.



- 5. PL:** Wciśnij zegar (6) i ustaw odpowiednią kompresję za pomocą BOA® Fit System.  
**EN:** Press the clock (6) and set the appropriate compression using the BOA® Fit System.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

