

KOD KATALOGOWY	AM-TX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-08
CODE	AM-TX-08
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-TX-08




(A) Orteza / Brace



1. **PL:** Rozepnij orteżę.
EN: Unfasten the brace.





2. **PL:** Załóż orteżę (A) na ramiona i przyłóż do sylwetki w celu jej dopasowania.
EN: Put the brace (A) on your arms and adjust it to your figure.

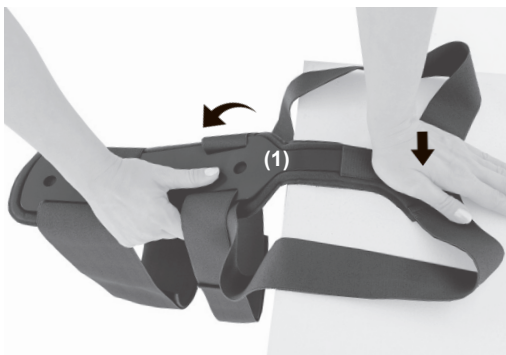

- 3. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skorygowania kształtu stelaża (1) uformuj go do kształtu sylwetki.
EN: If there is a need to correct the shape of the frame (1), shape it to the shape of your figure.

PL: UWAGA! Pamiętaj, że kształtowanie stelaża dokonujemy na wyrobie, który nie jest założony na pacjenta.
EN: ATTENTION! Remember that the shaping of the frame is made on a product that is not put on a patient.

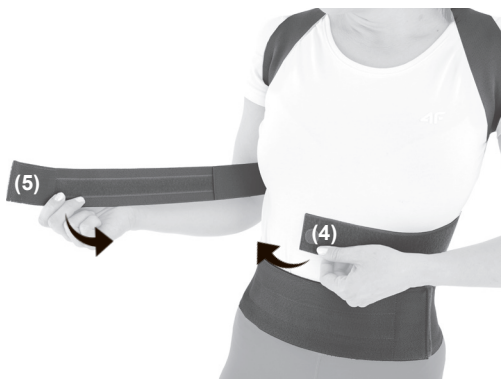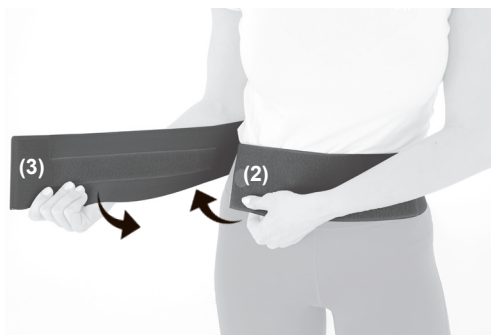

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję pasa i zapnij z przodu na rzepy (2,3) następnie ustaw odpowiednią kompresję szelek i zapnij na rzepy (4,5).
EN: Set the appropriate compression of the belt and fasten it with Velcro at the front (2,3), then set the appropriate compression of the shoulder straps and fasten it with Velcro (4,5).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.