


KOD KATALOGOWY	OSS-OS-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	ORTEZA STOPY OSS-OS-03
CODE	OSS-OS-03
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	FOOT ORTHOSIS OSS-OS-03



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

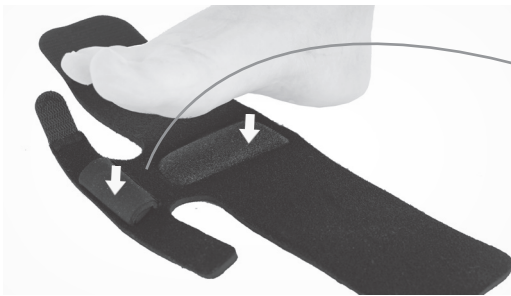


- 2. PL:** Umieść stopę na ortezie w taki sposób aby poduszeczka (1) znajdowała się pod palcami paliczków bliższych.

EN: Place your foot on the brace so that the cushion (1) is under the toes of the proximal phalanges.



- 3. PL:** Zapnij rzep pozycjonujący palce (2) według wskazanego kierunku. Jeśli zachodzi potrzeba skrócenia opaski, odetnij jej nadmiar.
EN: Fasten the Velcro that positions the fingers (2) in the indicated direction. If you need to shorten the band, cut off the excess.

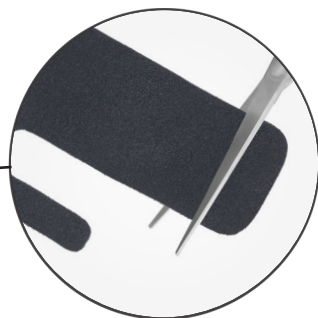

4. PL: Zapnij rzep (3) według wskazanego kierunku. Jeśli zachodzi potrzeba skrócenia opaski, odetnij jej nadmiar.

EN: Fasten the Velcro (3) according to the indicated direction.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.